



INSTRUKCJA UŻYCIA Nova Glass F

Opis

Nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich cement szkłano-jonomerowy do wypełnień
Do stosowania wyłącznie przez lekarza stomatologa w zalecanych wskazaniach.

Skład

■ Proszek: Fluorokrzemian glinowo-wapniowy, tlenek baru, tlenek cynku, pigmenty

■ Płyn: Kwas poliakrylowy, kwas winowy, kwas itakonowy, paraban i woda dejonizowana

Zalety

- Kompatybilny z miazgą i tkankami
- Wysoka odporność na zużycie
- Wysokie wartości przyczepności
- Niewielki rozmiar cząstek
- Wysoka nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich
- Dzięki niezawodnemu dopasowaniu minimalny wyciek krawędzi
- Wysokie i długotrwałe uwalnianie fluoru
- Wydłużony czas pracy, dobre właściwości mieszania
- Cienka warstwa, 16 µm -18 µm
- Działanie bakteriostatyczne
- Uniwersalny, opcje kolorów A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3
- Wysoka biokompatybilność, niska rozpuszczalność (<0,1%)
- Unikać wilgoci, zawiera żel krzemionkowy
- **Możliwość kondensacji**

Zalecane wskazania

- 1) Uzupełnienia klasy I i II w zębach mlecznych.
- 2) Uzupełnienia klasy I i II w zębach stałych
- 3) Pośredni materiał wypełnieniowy i podkładowy do stosowania w sytuacjach rozległych ubytków klasy I i II przy użyciu techniki laminatu warstwowego.
- 4) Klasa V i uzupełnienia powierzchni korzeni.
- 5) Budowa rdzenia.
- 6) Jako uszczelniając bruzd.
- 7) Materiał bazowy pod wypełnienie ubytków. (Kompozyt, amalgamat, podkład itp.)

Przeciwwskazania

- 1) Pokrycie miazgi
- 2) W rzadkich przypadkach produkt może powodować nadwrażliwość u niektórych osób. W przypadku wystąpienia takich reakcji przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem.

Aplikacja

1) Dozowanie proszku i płynu

- a) Dla dokładnego dozowania proszku należy lekko postukać w butelkę. Nie potrząsać i nie odwracać butelki dnem do góry. Wsypać proszek na łyżeczkę. Gdy łyżeczka jest pełna, zeszkrobać nadmiar z łyżeczki za pomocą korka do proszku, a następnie mocno dokręcić zakrętkę.
- b) Lekko potrząsnąć butelką z płynem w górę i w dół, a następnie przytrzymać butelkę z płynem odwróconą dnem do góry. Poczekać, aż płyn wypełni komorę z zakraplaczem. Podać płyn bez pęcherzyków powietrza na podkładkę do mieszania i szybko zamknąć zakrętkę butelki z płynem.



1 miarka proszku 2 krople płynu przy użyciu małej łyżeczki
1 miarka proszku 4 krople płynu przy użyciu dużej łyżeczki

2) Mieszanie

Podczas mieszania stopniowo i szybko dodawać proszek do mieszaniny za pomocą szpatułki.

Czas mieszania	20" - 25"	(23±2°C - 73,4±2 °F)
Czas pracy	2' - 3'	(23±2°C - 73,4±2 °F)
(od rozpoczęcia mieszania)		
Czas utwardzania	3'-3' 30"	(23±2°C - 73,4±2 °F)
Czas utwardzania w ustach	1' 20" - 1' 30"	(' : minuta " : sekunda)

3) Technika odbudowy

- a) Przygotuj ząb przy użyciu standardowych technik. Do pokrywania miazgi użyć wodorotlenku wapnia lub innego uszczelniaacza.
- b) Nałożyć preparat do kondycjonowania ubytków (10 sekund) lub preparat do kondycjonowania zębiny (20 sekund) na powierzchnie łączenia za pomocą wacika lub gąbki.
- c) Dokładnie spłukać wodą. Osuszyć wacikiem lub delikatnie przedmuchiwać strzykawką z powietrzem. Nie suszyć. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy przygotowane powierzchnie wydają się być lekko wilgotne.
- d) Wymieszać wymaganą ilość szkło-jonomeru.
- e) Przenieść cement do preparatu za pomocą odpowiedniego przyrządu. Unikać pęcherzyków powietrza.
- f) Uformować wstępny kontur i w razie potrzeby przykryć matrycą.
- g) Po utwardzeniu nałożyć do wyschnięcia w powietrzu.

Przechowywanie

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu. Temperatura przechowywania: 1-30 °C/ 33,8-86 °F

Okres ważności: 3 lata od daty produkcji

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach składniki Nova Glass F mogą powodować uczulenia. W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania produktu.

Interakcje

Materiały zawierające eugenol mogą hamować polimeryzację Nova Glass F.



Utylizacja: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazać na zatwierdzone składowisko odpadów lub do spalarni odpadów na warunkach zatwierdzonych przez władze lokalne.

Opakowania nieoczyszczone: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami

Środki ostrożności

Kontakt nieutwardzonego preparatu Nova Glass F z błoną śluzową, skórą lub oczami może powodować podrażnienia i należy go unikać. W razie przypadkowego kontaktu preparatu Nova Glass LC z oczami natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Dostępne na rynku rękawice medyczne nie zapewniają ochrony przed uczulającym działaniem metakrylanów. W przypadku kontaktu z tkanką jamy ustnej, natychmiast usunąć za pomocą gąbki lub wacika nasączonego alkoholem. Umyć wodą. Aby uniknąć kontaktu, można użyć koferdamu i/lub masła kakaowego lub wazeliny w celu odizolowania pola operacyjnego od skóry lub tkanki jamy ustnej. Nie mieszać proszku lub płynu ze składnikami innych cementów. Platformy aplikatorów są jednorazowego użytku

Data opracowania informacji o sposobie użycia: Akt 01 03.07.2020 TD-03-IFU-08 Nr ref.: 2001 i 2002

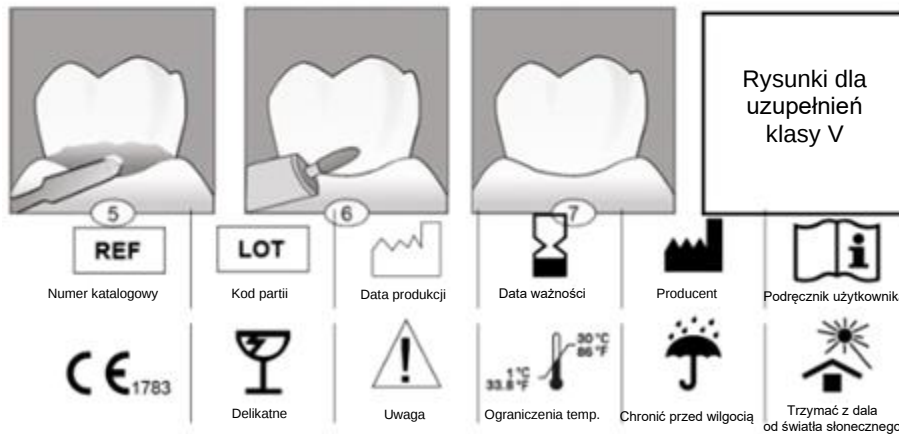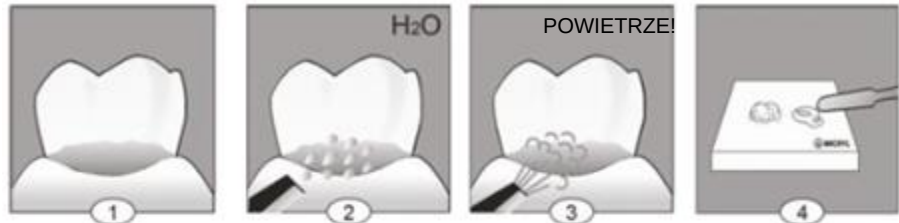

FETİH MH. MAHİR SK. NO:5/201
42030 KONYA TURCJA

TEL. +90 444 71 30
www.imicryl.com



INSTRUKCJA UŻYCIA Nova Glass F

Opis

Nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich cement szkłano-jonomerowy do wypełnień
Do stosowania wyłącznie przez lekarza stomatologa w zalecanych wskazaniach.

Skład

■ Proszek: Fluorokrzemian glinowo-wapniowy, tlenek baru, tlenek cynku, pigmenty

■ Płyn: Kwas poliakrylowy, kwas winowy, kwas itakonowy, paraban i woda dejonizowana

Zalety

- Kompatybilny z miazgą i tkankami
- Wysoka odporność na zużycie
- Wysokie wartości przyczepności
- Niewielki rozmiar cząstek
- Wysoka nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich
- Dzięki niezawodnemu dopasowaniu minimalny wyciek krawędzi
- Wysokie i długotrwałe uwalnianie fluoru
- Wydłużony czas pracy, dobre właściwości mieszania
- Cienka warstwa, 16 µm -18 µm
- Działanie bakteriostatyczne
- Uniwersalny, opcje kolorów A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3
- Wysoka biokompatybilność, niska rozpuszczalność (<0,1%)
- Unikać wilgoci, zawiera żel krzemionkowy
- **Możliwość kondensacji**

Zalecane wskazania

- 1) Uzupełnienia klasy I i II w zębach mlecznych.
- 2) Uzupełnienia klasy I i II w zębach stałych
- 3) Pośredni materiał wypełnieniowy i podkładowy do stosowania w sytuacjach rozległych ubytków klasy I i II przy użyciu techniki laminatu warstwowego.
- 4) Klasa V i uzupełnienia powierzchni korzeni.
- 5) Budowa rdzenia.
- 6) Jako uszczelniając bruzd.
- 7) Materiał bazowy pod wypełnienie ubytków. (Kompozyt, amalgamat, podkład itp.)

Przeciwwskazania

- 3) Pokrycie miazgi
- 4) W rzadkich przypadkach produkt może powodować nadwrażliwość u niektórych osób. W przypadku wystąpienia takich reakcji przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem.

Aplikacja

1) Dozowanie proszku i płynu

- c) Dla dokładnego dozowania proszku należy lekko postukać w butelkę. Nie potrząsać i nie odwracać butelki dnem do góry. Wsypać proszek na łyżeczkę. Gdy łyżeczka jest pełna, zeszkrobać nadmiar z łyżeczki za pomocą korka do proszku, a następnie mocno dokręcić zakrętkę.
- d) Lekko potrząsnąć butelką z płynem w górę i w dół, a następnie przytrzymać butelkę z płynem odwróconą dnem do góry. Poczekać, aż płyn wypełni komorę z zakraplaczem. Podać płyn bez pęcherzyków powietrza na podkładkę do mieszania i szybko zamknąć zakrętkę butelki z płynem.



1 miarka proszku 2 krople płynu przy użyciu małej łyżeczki
1 miarka proszku 4 krople płynu przy użyciu dużej łyżeczki

2) Mieszanie

Podczas mieszania stopniowo i szybko dodawać proszek do mieszaniny za pomocą szpatułki.

Czas mieszania	20" - 25"	(23±2°C - 73,4±2 °F)
Czas pracy	2' - 3'	(23±2°C - 73,4±2 °F)
(od rozpoczęcia mieszania)		
Czas utwardzania	3'-3' 30"	(23±2°C - 73,4±2 °F)
Czas utwardzania w ustach	1' 20" - 1' 30"	(' : minuta " : sekunda)

3) Technika odbudowy

- a) Przygotuj ząb przy użyciu standardowych technik. Do pokrywania miazgi użyć wodorotlenku wapnia lub innego uszczelniaacza.
- b) Nałożyć preparat do kondycjonowania ubytków (10 sekund) lub preparat do kondycjonowania zębiny (20 sekund) na powierzchnie łączenia za pomocą wacika lub gąbki.
- c) Dokładnie spłukać wodą. Osuszyć wacikiem lub delikatnie przedmuchiwać strzykawką z powietrzem. Nie suszyć. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy przygotowane powierzchnie wydają się być lekko wilgotne.
- d) Wymieszać wymaganą ilość szkło-jonomeru.
- e) Przenieść cement do preparatu za pomocą odpowiedniego przyrządu. Unikać pęcherzyków powietrza.
- f) Uformować wstępny kontur i w razie potrzeby przykryć matrycą.
- g) Po utwardzeniu nałożyć do wyschnięcia w powietrzu.

Przechowywanie

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu. Temperatura przechowywania: 1-30 °C/ 33,8-86 °F

Okres ważności: 3 lata od daty produkcji

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach składniki Nova Glass F mogą powodować uczulenia. W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania produktu.

Interakcje

Materiały zawierające eugenol mogą hamować polimeryzację Nova Glass F.



Utylizacja: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazać na zatwierdzone składowisko odpadów lub do spalarni odpadów na warunkach zatwierdzonych przez władze lokalne.

Opakowania nieoczyszczone: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami

Środki ostrożności

Kontakt nieutwardzonego preparatu Nova Glass F z błoną śluzową, skórą lub oczami może powodować podrażnienia i należy go unikać. W razie przypadkowego kontaktu preparatu Nova Glass LC z oczami natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Dostępne na rynku rękawice medyczne nie zapewniają ochrony przed uczulającym działaniem metakrylanów. W przypadku kontaktu z tkanką jamy ustnej, natychmiast usunąć za pomocą gąbki lub wacika nasączonego alkoholem. Umyć wodą. Aby uniknąć kontaktu, można użyć koferdamu i/lub masła kakaowego lub wazeliny w celu odizolowania pola operacyjnego od skóry lub tkanki jamy ustnej. Nie mieszać proszku lub płynu ze składnikami innych cementów. Platformy aplikatorów są jednorazowego użytku

Data opracowania informacji o sposobie użycia: Akt 01 03.07.2020 TD-03-IFU-08 Nr ref.: 2001 i 2002

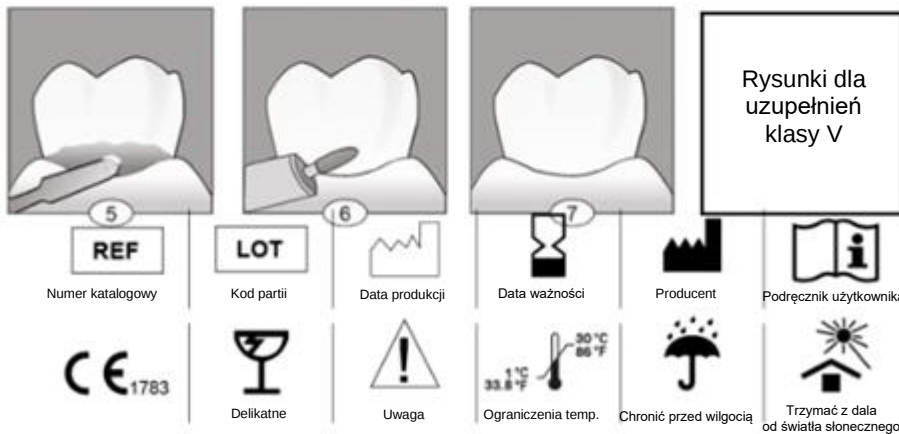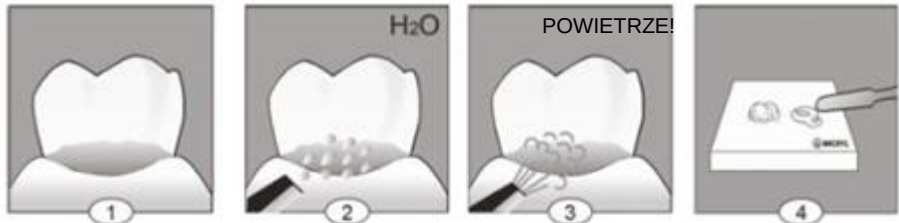

FETİH MH. MAHİR SK. NO:5/201
42030 KONYA TURCJA

TEL. +90 444 71 30
www.imicryl.com